

医用冷敷贴

使用说明书

【产品名称】 医用冷敷贴

【规格型号】 45×145、50×70、55×95、60×60、60×70、60×80、60×90、70×70、70×90、70×100、75×110、75×125、75×130、80×80、80×110、85×85、90×120、95×120、95×130、100×120、100×129、100×130、100×140、100×100、100×145、105×130、110×110、110×129、110×130、110×140、110×155、115×150、120×120、120×130、120×150、120×160、130×130、130×150、130×160、130×170、130×200、135×150、135×165、140×140、140×170、145×190、150×150、150×170、150×180、150×200、160×160、160×170、160×190、170×170、170×220、175×175、180×200、180×240、200×260、200×280、210×240（单位：mm）

【结构组成】 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。

【适用范围】 用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。

【适用人群】 用于闭合性软组织损伤(急性期)引起的红肿、胀痛等症状的降温冷敷。

【使用方法】

- 1、打开包装，去掉保护膜，将凝胶层直接贴敷在需要的部位表面即可；
- 2、每贴可持续使用2~8小时，建议两贴交替使用，冷藏后使用效果更佳。

【注意事项】

- 1、开放性皮肤损伤请勿用。
- 2、清洁产品贴用部位，以免汗水、头发等影响产品粘性。
- 3、儿童需在医师、家长的指导及监督下使用。
- 4、超过有效期禁止使用。

【产品备案凭证编号】

【产品技术要求编号】

【备案人名称】 山东 药业有限公司

【售后服务单位】 山东 药业有限公司

【生产企业】 山东 药业有限公司

【生产备案凭证编号】

【生产地址】 山东省菏泽市 路南

【联系电话】 0530-4415886

【生产日期】 见单包装

【使用期限】

【储存条件】 密封、常温下贮存；冷藏后使用效果更佳。

【编制日期】